

# Blephademodex®

Dette produkt er medicinsk udstyr. Læs brugsanvisningen før brug.  
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

## ANVENDELSE

BLEPHADEMODEX er sterile vådservietter med lotion til daglig afrensning af øjenlåg ved infektion forårsaget af *Demodex*.

Må kun anvendes på huden. Må ikke anvendes direkte i øjet.

## MÅ ANVENDES AF

Må kun anvendes af voksne.

## MÅ IKKE ANVENDES AF

Brug ikke BLEPHADEMODEX, hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne (se Produktbeskrivelse).

**Brug ikke BLEPHADEMODEX, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge har anviset det, da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger.**

**BLEPHADEMODEX må ikke anvendes til børn, medmindre lægen har anviset det, da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger.**

## PRODUKTBEKRIVELSE

BLEPHADEMODEX er sterile vådservietter med lotion.

Lotionen indeholder: PEG-8, polysorbit 80, poloxamer 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 capryl/capric-glycerider (macrogol 6 glycerolcaprylocaprat), natriumhyaluronat, dikaliumphosphat, kaliumdihydrogphosphat, rensat vand.

BLEPHADEMODEX er uden konserveringsmidler og stærke rensedmidler.

BLEPHADEMODEX har en frisk duft på grund af de naturlige ingredienser; duften forsvinder et par minutter efter anvendelse.

Farven på vådservietten kan variere. Dette skyldes de naturlige planteekstrakter (Terpinen-4-ol, et aktivt udtræk af tee tree olie) og er helt normalt.

## EGENSKABER

BLEPHADEMODEX kan anvendes:

- til daglig afrensning af øjenlågene ved infektion forårsaget af *Demodex*,
- til lindring af symptomerne på øjenlågsbetændelse eller inflammation (blefaritis) forårsaget af *Demodex*.

*Demodex* er hyppigt forekommende mikroskopiske mider, som lever på huden.

Hvis der sker en ophobning af miderne, kan de forårsage irritation af huden som f.eks. kløe, svie, ømme øjenlåg, rødme på øjenlåsranden og en fornemmelse af at have noget i øjet. Cylindriske skæl ved øjenvippekanten er et tydeligt tegn på infektion med *Demodex*. *Demodex* kan ikke fjernes med almindelige rensedmidler, men kræver behandling med specialprodukter. BLEPHADEMODEX rengør og fjerner skorper, skæl, urenheder og sekret på øjenlågene og øjenvipperne. BLEPHADEMODEX lindrer symptomerne i forbindelse med infektion forårsaget af *Demodex* som f.eks. kløe, svie, tør hud og inflammation på øjenlåsranden. Det lindrer rødme på øjenlågene og fornemmelsen af fremmedlegeme i øjet.

Det indeholder hyaluronsyre, som er et naturligt fugtgivende stof med beroligende og regenererende virkning på sart hud.

BLEPHADEMODEX tolereres godt.

Produktet er testet under oftalmologisk kontrol.

## GENERELLE ANBEFALINGER

### Dosering:

- Milde til moderate symptomer: Anvendes en gang dagligt, til natten, i 4 uger.
  - Moderate til svære symptomer: Anvendes to gange dagligt, morgen og til natten, i 4 uger.
- Øjenlægen vil eventuelt tilpasse dosis og varigheden af behandlingen efter hvor alvorlige dine symptomer er.
- Ligesom ved andre lignende behandlinger for betændelse på øjenlåsranden, vil øjenlægen muligvis anbefale, at du samtidig anvender øjendråber.

BLEPHADEMODEX kan anvendes uden oplæring.

Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage dem ud, før du anvender BLEPHADEMODEX.

Vask hænderne grundigt, før du anvender vådservietterne.

Åbn brevet og fold servietten ud (Figur 1); brug ikke nogen form for hjælpemidler til at åbne brevet.



Figur 1: Åbning af brevet.

Fold servietten rundt om spidsen af pegefingeren. Luk øjet og hold det lukket. Placer fingeren forsigtigt på øjenlåget og øjenvippekanten (Figur 2).

Masser forsigtigt med små cirkulende bevægelser for at fjerne eventuelle skorpedannelser eller sekret.



Figur 2: Rengøring af øjenlåg og øjenvipper.

**Gentag afrensningen på det andet øje med en ny vådserviet.**

BLEPHADEMODEX er ikke-fedtende og skal ikke skylles af.

Hold øjet lukket i 15 sekunder efter brug.

## FORSIGTIGHEDSREGLER

Du skal kontrollere, at emballagen er ubeskadiget, før du bruger produktet første gang. Du må kun bruge vådservietten, hvis brevet er uåbnet.

Du må ikke genbruge servietten, da virkningen af servietten derved mindskes, og risikoen for infektion øges.

Du skal kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis dine symptomer ikke bedres, eller hvis de forværrer.

## ADVARSLER

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå at få BLEPHADEMODEX i øjet. Du kan få en brændende fornemmelse i øjet. Skyl øjet i sterilt vand eller saltvandsopløsning, hvis det sker.

## BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med BLEPHADEMODEX: Brændende eller kløende fornemmelse i nogle minutter efter anvendelse, rødme eller hævede øjenlåg, rødme øjne og allergiske reaktioner.

Hvis du oplever dette, skal du ikke sætte dine kontaktlinser i igen.

Hvis du oplever bivirkninger eller en unormal fornemmelse efter brug af dette præparat, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet og indberette det til den lokale distributør, til fremstilleren eller til sundhedsmyndighederne (se kontaktoplysninger i slutningen af denne indlægsseddel).

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Opbevares ved temperaturer mellem 8°C og 25°C.

Må ikke udsættes for direkte sollys eller fugt. Bortskaf vådservietterne straks efter brug. Brug ikke vådservietterne efter den udløbsdato, der står på brevet og på den ydre pakning. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned og gælder for intakt emballage og ved korrekte opbevaringsforhold.

Produktet skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer (brev og vådservietten bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, yderkartonen og indlægssedlen bortskaffes som genanvendeligt affald).

**Dato for seneste ændring og version af indlægsseddel: Ver. 5 07/2022**

## Fremstillere:

Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrig  
www.laboratoires-thea.com  
Afsnit « Contact us »

## Distributør:

Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige, www.thea-nordic.com

## Sundhedsmyndigheder:

Lægemiddelstyrelsen,  
Axel Heides Gade 1, 2300 København  
Tel. +45 72 22 74 00 - Fax +45 44 88 95 99  
e-post: med-udstyr@dkma.dk;  
dkma@dkma.dk - www.medicinskudstyr.dk

CE 0459

## PIKTOGRAMMER PÅ PAKNINGEN

	Fremstillere
	Fremstillingsdato
	Temperaturgrænser
	Medicinsk udstyr
	Engangsbrug
	Batchnummer
	Dato for sidste anvendelse
	Steriliseret ved bestråling
	Se brugsanvisning
	Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget
	Advarsel
	Katalognummer
	Produktet må ikke udsættes for direkte sollys
	Opbevares tørt